

## 強力すべり止めマット


### 転倒事故を予防して安全で快適な入浴を楽しむマット

#### 主な用途と使用方法

浴室の入り口、浴槽の手前の床、浴槽内の底面に敷く。

最初に敷く予定の部分の床を浴室用洗剤で洗い、水洗する。

十分に水洗した後に、本品の裏面（ダイヤ柄の細かい面）を下にして敷く。

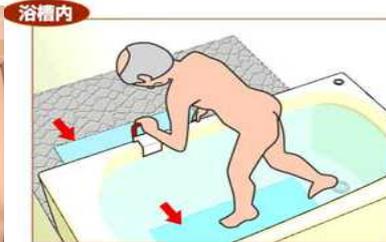

浴槽内に敷くだけで**マット**も**足元**もすべらない。



浴槽から出るときもすべらない。

台所の流し台の前の床、洗面所の床、玄関、トイレの床など

敷く予定の床を拭取りクリーナーでこすり拭きする。

別の湿った布で洗剤成分を良く拭き取る。

本品の裏面（ダイヤ柄の細かい面）を下にして敷く。



本品裏面



#### プールサイド、シャワールームなど

最初に敷く予定の部分の床を浴室用洗剤で洗い、水洗する。

十分に水洗した後に、本品の裏面（ダイヤ柄の細かい面）を下にして敷く。

業務用には、3 m、5 mなど希望の長さになれるロングマットがお勧めです。

（幅×50cm 長さ×フリーサイズ）

#### 使用上の注意事項

- ・マットに塩素系のカビ取り剤が付着すると色落ちしたり変色したりする場合があります。

塩素系カビ取り剤が本品の付着した場合は、すぐに中性洗剤で洗って十分に水洗してください。ベンジンやシンナー、強酸性や強アルカリ性の薬品が付着した場合も同様に洗浄してください。

- ・使用後は、直射日光を避けて、陰干しをして乾燥させてください。
- ・マットが汚れた場合は、中性洗剤を使ってスポンジや布でこすり洗いしてください。